

Professional for you

BIO-ALKOHOL¹

Flächendesinfektion



IHO

VAH

¹Die Tränklösung enthält Bio-Alkohol.

DESINFEKTIONSTÜCHER DESCOCEPT SENSITIVE WIPES Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- Ausgezeichnet für Zuhause und unterwegs
- Wirksam gegen Noro- und Coronaviren
- Gute Material- und Hautverträglichkeit

Produktbeschreibung

Professional for you DESINFEKTIONSTÜCHER DESCOCEPT SENSITIVE WIPES sind gebrauchsfertige und aldehydfreie Schnelldesinfektionstücher auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten sowie für eine antimikrobielle Händereinigung mit sehr guter Hautverträglichkeit, welche dermatologisch getestet ist. **Professional for you DESINFEKTIONSTÜCHER DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** sind parfümfrei und besonders geeignet für alle abwashbaren Oberflächen im Haushalt und unterwegs. Eine ausgezeichnete Ergänzung bildet die **Professional for you SCHNELLDISINFEKTION DESCOCEPT SENSITIVE** zur allgemeinen Desinfektion von Flächen aller Art.

Anwendungsgebiete

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

bakterizid, levurozid (Candidapilze):	2 min
tuberkulozid:	1 min
begrenzt viruzid (behüllte Viren wie HIV, HBV, HCV, Coronaviren):	1 min
begrenzt viruzid PLUS (behüllte und unbehüllte Viren wie Noro- und Adenoviren):	3 min

Anwendung

Ein Tuch aus der Verpackung entnehmen und Oberflächen und Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Einwirkzeiten beachten. Nicht

auf alkoholempfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas) anwenden. Nach der Entnahme die Packung wieder sorgfältig verschließen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Tücher nur einmal verwenden. Nicht in der Toilette entsorgen. Nicht zur Anwendung an Kleinkindern geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 42 Tage

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA), Aluminium und Messing.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Produkt	Gebinde	Tuchgröße	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
Professional for you DESINFEKTIONSTÜCHER DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	Packung	20 x 22 cm	60 Tücher	9	01-323DS-To60	19458693

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



CE 0482

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.